

# Afkoppelen folfusorpomp

## Stappenplan voor thuisverpleegkundige



1. Ontsmet je handen
2. Trek 20 ml NaCl 0,9% op in een spuit van 20ml
3. Ontsmet je handen een 2<sup>de</sup> maal en trek niet-steriele handschoenen aan
4. Sluit de klem ter hoogte van de grip
5. Houd een steriel kompres onder de connectie tussen de pomp en katheterleiding
6. Ontkoppel deze
7. Sluit de leiding van de folfusorpomp af, doe dit met een afsluitdop of gebruik de steriliteitsdop van de pomp (steriliteitsdop verwijderen en de debietregelaar hierop aansluiten, dit om hiervan een gesloten systeem te maken)



8. Spoel de katheter pulserend met 20 ml NaCl 0,9%
9. Verwijder de naald door met één hand het ronde plaatje tegen te houden en met de andere hand de naald terug te trekken aan de vleugels tot een groen bolletje zichtbaar wordt op het plaatje. Vanaf dan is het veilig om de naald te deponeren in een naaldcontainer.
10. Dek af met een steriel verband



**Naalden worden steeds in uw naaldcontainer gedeponerd. De folfusorpomp wordt in de daarvoor voorziene zak met de patiënt meegegeven naar het ziekenhuis.**

Bij problemen aarzel niet om het ziekenhuis te contacteren.



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie.